

Właściwy sposób prowadzenia pomiarów

- 1 Usunąć ubranie z ramienia, aby mankiety mógł swobodnie przylegać do skóry.



- 2 Owinąć ciasno mankiety dookoła nadgarstka używając do tego paska (0.4") na rzepy (zachować odstęp 1cm od dłoni).




- 3 Usiąść na krześle ze stopami ułożonymi płasko na podłodze.



Wykonanie pomiarów

1 Nacisnąć przycisk „Start/Stop.”

Na wyświetlaczu pojawią się wszystkie symbole.

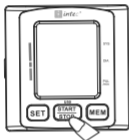

Wyświetlanie wszystkich symboli.



Automatyczne opróżnianie mankietu z powietrza.



Rozpoczęcie pompowania powietrza.



2 Pomiar rozpoczyna się podczas pompowania mankietu.


Symbol bicia serca „♥” zaczyna migać, gdy zostanie wykryte tętno.



Wykonanie pomiarów

- 3** Wartość ciśnienia krwi i tętna zostają wyświetlone po zakończeniu pomiaru. Mankiet jest opróżniany z powietrza automatycznie, a wyniki pomiarów są zapisywane w pamięci urządzenia.

Symbol "IHB" zostanie wyświetlony, gdy zostanie wykryte nieregularne bicie serca.

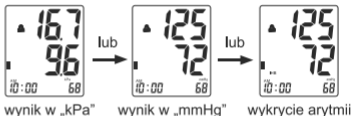

- 4** Nacisnąć przycisk „Start/Stop” aby wyłączyć urządzenie.

Urządzenie wyłączy się automatycznie po dwóch minutach.

UWAGA:

Aby w dowolnym momencie przerwać pompowanie powietrza lub pomiar, należy nacisnąć przycisk "Start/Stop". Urządzenie przerwie pompowanie powietrza i wyłączy się.

